



Arpemat Wervelplank Matras 

Handleiding:

Artikel: 109590001 Arpemat Matras
Artikel: 109590002 Arpemat Knieblok



Voor ingebruikname dient de gebruiker kennis te nemen en zich te conformeren aan deze handleiding. Bij Vragen en of opmerkingen en onduidelijkheden nooit het product in gebruik nemen zonder overleg met "Arpemat". Aanpassingen en of onjuist gebruik vallen buiten de aansprakelijkheid van Arpemat.

versie: 01.04.4571



1. Controleer of het Arpemat wervelplank matras niet in een beschadigde verpakking bij u is aangeleverd.
2. Haal het Arpemat wervelplank matras uit de verpakking en controleer deze op oneffenheden.
3. Leg het Arpemat wervelplank matras uit op uw of de bijgeleverde wervelplank
4. Maak als eerste de bovenste lus/ring verbinding vast. Figuur 1 en figuur 2



Figuur 1.



figuur 2.

5. Maak daarna de overige banden langs de zijkanten op de zelfde manier vast zodat het matras vast komt te liggen op de wervelplank.
6. Maak nu de lange banden vast aan de hoofdzijde door ze aan de vastgemaakte kant door de ogen van de wervelplank heen te halen naar de achterzijde. Je haalt ze nu andere zijde weer door de ogen naar boven en kleeft ze vast op de zachte zijde bestemd voor de head blocks. Zie figuur 3 en figuur 4.



Figuur 3.



figuur 4.

7. Het Arpemat wervelplank matras is nu bevestigd en is klaar voor gebruik. De banden zijn door het matras heen gestikt en bestaan uit een stuk, dit om het geheel sterk te maken.
8. De Head Blocks (*niet standaard meegeleverd*) kunnen nu op de daarvoor bestemde zachte stukken aan de bovenzijde van het matras worden geplaatst.

9. De hoofdbandjes, om het hoofd te fixeren over de Head Blocks heen, worden wel standaard meegeleverd. Plaats een van deze bandjes over het voorhoofd van de patiënt en maak ze vast aan de daarvoor bestemde ringen langs het zachte klittenband gedeelte aan de bovenzijde van het matras. Plaats nu het tweede bandje over de kin van de patiënt en maak ook deze vast aan de daarvoor bestemde ringen langs het zachte klittenband gedeelte aan de bovenzijde van het matras. Zie figuur 5 en figuur 6.



Figuur 5.




Figuur 6.

10. Nu deze stappen zijn doorlopen kunt u onder de knieholte van de patiënt "Arpemat Knie block" aanbrengen om overstrekken van de knieholten te voorkomen. Het is de keuze van de eindgebruiker of hij dit knie block, met de aangehechte band, vastmaakt onderlangs de wervelplank of dat hij deze los gebruikt. Het "Arpemat Knie block" wordt niet standaard meegeleverd maar is apart te bestellen. Zie figuur 7,8 en 9.



Figuur 7

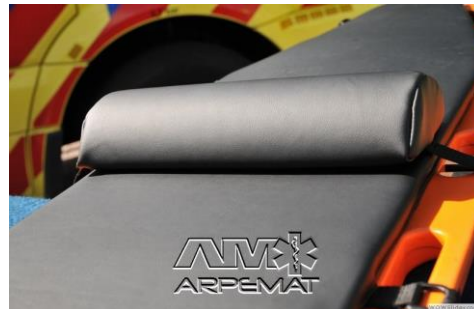

figuur 8.



Figuur 9.

11. Het Schoonmaken van het matras is eenvoudig te verwezelijke door middel van water met een sopje. Schoonmaakdoekjes en of alcohol zijn toegestaan, zolang er maar geen bijtende stoffen aan te pas komen. Het materiaal van het Arpemat wervelplank matras is vervaardigd uit Burgago kunst leder.
12. Tot slot kunt u de “Fast Rip” of anders gezegd “de Spin” gaan gebruiken om de patiënt vast te leggen op de wervelplan zoals u gewend bent. Deze is niet meegeleverd met de aanschaf van het Arpemat Wervelplank Matras. Zie onderstaande afbeeldingen



----- End -----